

Pulsoximetru pentru deget

Pulsoximetrul Cool Med® este un dispozitiv medical neinvaziv, inovator, comod ce măsoară concentrația de oxigen din sângele periferic (SpO₂) și pulsul prin deget. Măsurarea este rapidă și precisă și se realizează prin emiterea și recepția de raze infraroșii.

Recomandare

Achiziționați doar pulsoximetre cu certificat CE medical, având ca beneficiu principal o măsurare corectă a concentrației de oxigen și a pulsului.

În acest sens puteți verifica că marcajul CE de pe cutie să fie însoțit de un număr din 4 cifre, al organismului de certificare sau solicitați vânzătorului să vă prezinte avizul de la Ministerul Sănătății (ANMMDM) pentru a avea certitudinea că producătorul îndeplinește standardele de calitate și că aceste pulsoximetre au dreptul să fie vândute legal pe piața din România.

Caracteristici

- poate fi folosit atât adulți, cât și de copii; în cazul în care degetele copilului sunt prea mici, puteți folosi degetul mare de la piciorul acestora;
- **măsurarea** este rapidă și precisă și se realizează prin emiterea și recepția de raze infraroșii;
- certificare CE ca și dispozitiv medical clasa 2a, realizată de TUV SUD (CE 0123);
- produsul este potrivit pentru familii, spitale (incluzând uz clinic la internist/chirurg, pediatru etc.), organizații sociale medicale, îngrijire fizică în sport, etc.;
- **ecran TFT cu 3 culori** : pentru un afișaj mai bun al datelor;
- ecranul cu afișaj rotativ multidirecțional (**4 moduri de afișare**) vă permite să vizualizați rezultatele în orice direcție;
- **prevăzut cu alarmă** : se poate seta de utilizator (depășire interval puls, depășire interval SpO₂) și atunci când valorile măsurate depășesc parametrii setați va exista o avertizare sonoră;
- **greutatea și volumul redus** îl fac ușor de transportat și depozitat;
- **consum redus de energie**;
- se închide automat în caz de neutilizare mai mult de 8 secunde;
- un singur buton de operare;
- **ușor de utilizat** : puneți unul dintre degete în orificiul de cauciuc al pulsoximetrului (o zonă cât mai mare posibil) cu suprafața unghiei îndreptată în sus, apoi eliberați clama. Apăsăți butonul de pornire și pulsoximetrul va intra în stare de funcționare;
- temperatura de funcționare : 5°C până la 40°C
- temperatura de depozitare : -10°C până la 40°C
- mediu de depozitare - umiditate relativă : 15% - 80%
- **greutate** : 65 grame (fără baterii)
- alimentare : 2 baterii tip AAA Alkaline (neincluse)
- autonomie : 30 ore
- material : plastic ABS

Caracteristici afișare

- afișare valoare SpO₂;
- afișare valoare puls;
- indicator baterie;

- pletismogramă;
- indice de perfuzie;

Specificații tehnice

- **intervale măsurare SpO2** : 70%-99%;
- acuratețe $\pm 2\%$ pentru 70%~99%, sub 70% nespecificat;
- rezoluție : $\pm 1\%$;
- **interval măsurare puls** : 30 bpm~240 bpm;
- acuratețe ± 1 bpm sau $\pm 1\%$;
- rezoluție: $\pm 1\%$;
- perfuzie joasă: $\leq 0,4$;
- interval indice perfuzie 0,1 – 20%;

Pachetul include

- pulsoximetru : 1 bucată;
- șnur textil : 1 bucată;
- manual de utilizare;

Dimensiune ambalaj produs : 10.5 x 6.4 x 4 cm

Dimensiune produs : 6 x 3.5 x 3.5 cm

Garanție : 12 luni

Atenție

- ⚠ Acest produs este un dispozitiv medical și nu intră sub incidența O.U.G. 34/2014 art 3, alin 3, lit b, privind returul produselor.
- ⚠ Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Aparatul poate fi utilizat numai în scopul menționat în instrucțiunile de utilizare.
- ⚠ Produsele medicale nu sunt jucării. Aparatul a fost conceput pentru utilizarea practică, însă nu poate înlocui un consult medical.
- ⚠ **Pulsoximetrul NU are scop de diagnosticare. În caz de valori anormale afișate, vă rugăm mergeți la spital pentru o examinare ulterioară.**
- ⚠ **În timpul perioadelor prelungite de utilizare, dacă simțiți disconfort sau durere în deget, vă rugăm să scoateți pulsoximetrul imediat pentru a împiedica rănirea degetului.**
- ⚠ Nu folosiți pulsoximetrul într-un mediu RMN sau CT.
- ⚠ Nu folosiți niciodată materiale de curățare abrazivă, precum lama de oțel sau lustru pentru metale.
- ⚠ Nu lăsați niciun lichid să pătrundă în produs, și nu scufundați părți ale dispozitivului în niciun lichid.
- ⚠ Evitați să turnați lichid pe dispozitiv atunci când îl curățați.
- ⚠ Este interzis să lăsați produsul expus direct razelor soarelui, a unor substanțe chimice sau la temperaturi ridicate.
- ⚠ Măsurătorile SpO2 pot fi afectate negativ în prezența luminii ambientale ridicate. Acoperiți zona senzorului pentru a o proteja de lumina solară (cu un prosop chirurgical, de exemplu), dacă este necesar. Evitați folosirea echipamentului imediat după ce îl mutați dintr-un mediu cald într-un loc cald, umed.
- ⚠ **PERICOL DE EXPLOZIE** – Nu folosiți pulsoximetrul într-o atmosferă inflamabilă. Bateriile trebuie scoase din compartiment dacă dispozitivul nu va fi folosit o perioadă lungă.

Certificat de garanție comercială

SMART TOUCH GROUP SRL, cu sediul în București, Strada Iacob Negruzzi 39, cod unic de înregistrare RO26740339, J40/3542/2010, capital social 200 lei, în calitate de Vânzător (denumit în continuare „Smart Touch Group”), acordă Cumpărătorului, strict în condițiile prevăzute mai jos, o garanție de funcționare corespunzătoare a produsului achiziționat de Cumpărător, (denumit în continuare în mod generic „Produsul”), în condițiile unei utilizări normale a Produsului, potrivit scopului și destinației acestuia.

PRODUS : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.

DATA VÂNZĂRII : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.

TERMEN GARANȚIE* : conform bonului fiscal atașat / facturii atașate : 12 luni

* se calculează de la data vânzării, indicată în bonul fiscal atașat / facturii atașate

Bonul fiscal / factura face parte integrantă din prezentul Certificat de Garanție comercială. Cumpărătorul, în calitate de consumator, beneficiază de toate drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, inclusiv prin Ordonanța de Guvern nr. 21/1992 republicată, Legea nr. 449/2003, republicată și actualizată cu actele normative subsecvente, și Legea nr. 296/2004, republicată, cu modificările ulterioare în vigoare la data cumpărării.

Prezenta garanție nu afectează în niciun fel drepturile conferite consumatorului prin lege și nu exclude răspunderea Vânzătorului pentru lipsa de conformitate a Produsului, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 449/2003, precum și răspunderea pentru vicii ascunse ale Produsului și Cumpărătorul declară și confirmă că s-au predat, după caz, instrucțiunile de utilizare și întreținere în limba română, și s-a predat Produsul în perfectă stare de funcționare, s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanție.

Condiții de acordare a garanției

1. Pentru a beneficia de prezenta garanție, Cumpărătorul este obligat să prezinte factura originală/bonul fiscal original de cumpărare a Produsului și Certificatul de Garanție al Produsului.

2. Garanția privește Produsul în integralitatea sa, așa cum a fost livrat Cumpărătorului. Si nu se extinde asupra consumabilelor.

3. Garanția este asigurată de către Smart Touch Group prin înlocuirea Produsului defect cu un altul identic, în limita stocului Smart Touch Group disponibil, sau, în cazul în care înlocuirea acestuia nu este posibilă sau este disproporționată, prin restituirea contravalorii Produsului conform legislației în vigoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data când Smart Touch Group a luat cunoștință de deficiențele respective sau de la data la care un document de predare-primire a fost încheiat ca urmare a predării Produsului de către Cumpărător unei persoane desemnate Smart Touch Group pentru a încheia documentul de predare-primire, dată aflată în interiorul termenului de garanție, cu condiția respectării tuturor cerințelor din prezentul certificat.

4. Pentru repararea Produsului, Cumpărătorul va contacta Vânzătorul telefonic la numărul de telefon 0724313365 sau în scris pe e-mail office@smarttouchgroup.ro.

5. În cazul în care Produsul este un produs de folosință îndelungată, potrivit art. 2 lit. i) din Legea 449/2003, care nu poate fi reparat sau a cărui durată cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, Cumpărătorul poate cere înlocuirea Produsului sau restituirea contravalorii Produsului.

6. Eventualele deteriorări cauzate de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare de genul zgârieturilor, șocurilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group în momentul achiziționării Produsului nu constituie obiectul garanției.

7. Termenul de garanție este 12 luni. Termenul de garanție curge de la data intrării Produsului în posesia Cumpărătorului.

8. Pentru produsele reparate, termenul de garanție comercială se prelungește cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă între momentul în care deficiențele Produsului, survenite în interiorul termenului

de garanție, au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group / Produsul a fost prezentat persoanei desemnate de Smart Touch Group cu încheierea documentelor de predare-primire și momentul în care Produsul a fost înlocuit și , respectiv, Cumpărătorul a fost notificat în scris în vederea ridicării sau predării efective a Produsului.

Pierderea garanției

Smart Touch Group fiind exonerat de obligațiile sale privind garanția, la îndeplinirea oricărei condiții de mai jos:

1. Nerespectarea de către Cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere ori a parametrilor de alimentare (ex: temperatură mediu ambiant, etc.) precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc Produsul la livrare și de care Cumpărătorul a luat la cunoștință.
2. Defectul reclamat se datorează vinei exclusive a Cumpărătorului.
3. Modificarea / desigilarea / repararea Produsului de către persoane fizice sau juridice neautorizate de către Smart Touch Group.
4. Utilizarea Produsului în alt regim decât cel precizat de manualul utilizatorului.

Importator : Smart Touch Group S.R.L. , str. Iacob Negruzzi , nr. 39.

Pentru garanție puteți sa ne contactați la numărul de telefon : 0724313365.

Adresa de primire a produselor pentru garanție este : Strada Oașului 16, Otopeni, Județ Ilfov.

Vânzător

Cumpărător