

**Tensiometru clasic cu stetoscop
Model MC50C**

Manual de instrucțiuni

- ⚠ CITIȚI MANUALUL ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
- ⚠ Acesta este un dispozitiv medical în conformitate cu standardul EN 1060 referitor la aparate non-invazive.

Modul de operare

1. Poziționați manșeta

Exersați pașii descriși în continuare de câteva ori pentru a vă familiariza cu aparatul. Înainte de a vă măsura tensiunea relaxați-vă timp de 15 minute, asta pentru a reduce riscul erorilor care pot apărea în urma desfășurării unei activități fizice. Dacă sunteți dreptaci plasați manșeta pe mâna stângă și întindeți brațul cu palma în sus. Indiferent dacă sunteți în poziția șezut sau culcat, asigurați-vă că manșeta este poziționată în dreptul inimii. Stetoscopul trebuie pus pe interiorul brațului deasupra cotului, deoarece pe acolo trece artera (sau o puteți localiza prin palpare). Fixați manșeta cu ajutorul scaiului aflat pe aceasta.

2. Umflați manșeta

Căutați pulsul cu ajutorul vârfurilor degetelor pentru a vă asigura că aparatul (stetoscopul) este poziționat exact unde pulsul este mai puternic. Introduceți capătul de ascultat al stetoscopului sub manșetă și puneți-vă olivele în urechi, țineți manometrul în mâna stângă sau agățați-l în gaica de pe manșetă, închideți robinetul parei prin răsucirea acestuia în sensul acelor de ceasornic, **NU UMFLAȚI MANȘETA LA MAXIM**, umflați manșeta prin presarea repetată a parei cu ajutorul mâinii drepte. Ascultați pulsul în timp ce umflați manșeta și urmăriți manometrul, în momentul în care nu mai auziți bătăile inimii, mai creșteți presiunea cu 30 mm / coloană Hg.

3. Dezumflarea manșetei

Deschideți valva (robinetul) manșetei prin rotire în sens invers acelor de ceasornic, în așa fel încât la fiecare bătaie a inimii, presiunea pe care o arată manometrul să scadă cu o valoare cuprinsă între 2 – 4 mm coloană Hg. Aceasta înseamnă o scădere de una sau două linii pe cadranul manometrului la fiecare secundă. Nerespectarea celor de mai sus duce la o măsurare inexactă.

ATENȚIE : pe parcursul măsurătorii circulația sanguină este blocată așa că nu lăsați manșeta umflată mai mult decât este necesar.

4. Tensiunea sistolică

După deschiderea robinetului, ascultați cu atenție pulsul. În momentul în care auziți bătăile pulsului notați valoarea indicată pe manometru. Aceasta este sistola (tensiunea “mare”). Sunetele auzite pot părea diferite la început, ascultați cu atenție și obișnuiți-vă cu aceste zgomote “ciudate”. Veți observa de asemenea că în momentul citirii tensiunii sistolice, acul manometrului va oscila.

5. Tensiunea diastolică

Lăsați manșeta să se dezumfle în aceeași manieră (2 – 4 mm coloană Hg pe secundă). Ascultați cu atenție cu ajutorul stetoscopului bătăile inimii. Sunetele pe care le veți auzi își vor schimba tonalitatea de la bătăi puternice acestea vor deveni mai încete sau se vor transforma într-un fâșăit ritmic asemănător cu sunetul făcut de ștergătorul de parbriz sau de o matură. În momentul în care nu veți mai auzi niciun sunet citiți ecranul manometrului. Aceasta va fi diastola (tensiunea “mică”).

Observații

- △ Cu îngrijirea potrivită funcționarea aparatului se va întinde pe o lungă durată de timp. Pentru buna funcționare a aparatului respectați aceste instrucțiuni.
- △ Manometrul trebuie să fie mânuit cu atenție. NU ÎL LOVIȚI SAU TRÂNTIȚI. Acul manometrului trebuie să indice valoarea “0” atunci când manșeta este complet dezumflată.

Certificat de garanție comercială

SMART TOUCH GROUP SRL, cu sediul în București, Strada Iacob Negruzzi 39, cod unic de înregistrare RO26740339, J40/3542/2010, capital social 200 lei, în calitate de Vânzător (denumit în continuare „Smart Touch Group”), acordă Cumpărătorului, strict în condițiile prevăzute mai jos, o garanție de funcționare corespunzătoare a produsului achiziționat de Cumpărător, (denumit în continuare în mod generic „Produsul”), în condițiile unei utilizări normale a Produsului, potrivit scopului și destinației acestuia.

PRODUS : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.
DATA VÂNZĂRII : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.

TERMEN GARANȚIE* : conform bonului fiscal atașat / facturii atașate : 12 luni

* se calculează de la data vânzării, indicată în bonul fiscal atașat / facturii atașate

Bonul fiscal / factura face parte integrantă din prezentul Certificat de Garanție comercială. Cumpărătorul, în calitate de consumator, beneficiază de toate drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, inclusiv prin Ordonanța de Guvern nr. 21/1992 republicată, Legea nr. 449/2003, republicată și actualizată cu actele normative subsecvente, și Legea nr. 296/2004, republicată, cu modificările ulterioare în vigoare la data cumpărării.

Prezenta garanție nu afectează în niciun fel drepturile conferite consumatorului prin lege și nu exclude răspunderea Vânzătorului pentru lipsa de conformitate a Produsului, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 449/2003, precum și răspunderea pentru vicii ascunse ale Produsului și Cumpărătorul declară și confirmă că s-au predat, după caz, instrucțiunile de utilizare și întreținere în limba română, și s-a predat Produsul în perfectă stare de funcționare, s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanție.

Condiții de acordare a garanției

1. Pentru a beneficia de prezenta garanție, Cumpărătorul este obligat să prezinte factura originală/bonul fiscal original de cumpărare a Produsului și Certificatul de Garanție al Produsului.

2. Garanția privește Produsul în integralitatea sa, așa cum a fost livrat Cumpărătorului. Si nu se extinde asupra consumabilelor.

3. Garanția este asigurată de către Smart Touch Group prin înlocuirea Produsului defect cu un altul identic, în limita stocului Smart Touch Group disponibil, sau, în cazul în care înlocuirea acestuia nu este posibilă sau este disproporționată, prin restituirea contravalorii Produsului conform legislației în vigoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data când Smart Touch Group a luat cunoștință de deficiențele respective sau de la data la care un document de predare-primire a fost încheiat ca urmare a predării

Produsului de către Cumpărător unei persoane desemnate Smart Touch Group pentru a încheia documentul de predare-primire, dată aflată în interiorul termenului de garanție, cu condiția respectării tuturor cerințelor din prezentul certificat.

4. Pentru repararea Produsului, Cumpărătorul va contacta Vanzătorul telefonic la numărul de telefon 0724313365 sau în scris pe e-mail office@smarttouchgroup.ro.

5. În cazul în care Produsul este un produs de folosință îndelungată, potrivit art. 2 lit. i) din Legea 449/2003, care nu poate fi reparat sau a cărui durată cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, Cumpărătorul poate cere înlocuirea Produsului sau restituirea contravalorii Produsului.

6. Eventualele deteriorări cauzate de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare de genul zgârieturilor, șocurilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group în momentul achiziționării Produsului nu constituie obiectul garanției.

7. Termenul de garanție este 12 luni. Termenul de garanție curge de la data intrării Produsului în posesia Cumpărătorului.

8. Pentru produsele reparate, termenul de garanție comercială se prelungește cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă între momentul în care deficiențele Produsului, survenite în interiorul termenului de garanție, au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group / Produsul a fost prezentat persoanei desemnate de Smart Touch Group cu încheierea documentelor de predare-primire și momentul în care Produsul a fost înlocuit și, respectiv, Cumpărătorul a fost notificat în scris în vederea ridicării sau predării efective a Produsului.

Pierderea garanției

Smart Touch Group fiind exonerat de obligațiile sale privind garanția, la îndeplinirea oricărei condiții de mai jos:

1. Nerespectarea de către Cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere ori a parametrilor de alimentare (ex: temperatură mediu ambiant, etc.) precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc Produsul la livrare și de care Cumpărătorul a luat la cunoștință.

2. Defectul reclamat se datorează vinei exclusive a Cumpărătorului.

3. Modificarea / desigilarea / repararea Produsului de către persoane fizice sau juridice neautorizate de către Smart Touch Group.

4. Utilizarea Produsului în alt regim decât cel precizat de manualul utilizatorului.

Importator : Smart Touch Group S.R.L. , str. Iacob Negruzzi , nr. 39.

Pentru garanție puteți să ne contactați la numărul de telefon : 0724313365.

Adresa de primire a produselor pentru garanție este : Strada Oașului 16, Otopeni, Județ Ilfov.

Vanzător

Cumpărător