


Termometru clinic fără Mercur Model CRW-1108

Manual de instrucțiuni

Părțile componente

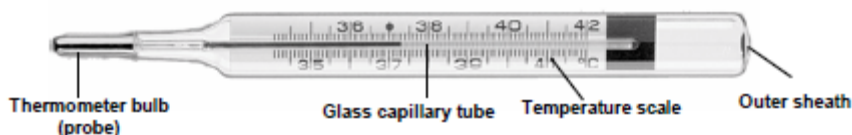

Specificații

Scara de măsurare : 35.0°C – 42.0 °C

Rezoluție : 0.1 °C

Acuratețe : +0.1 °C / -0.15 °C

Temperatura de operare și depozitare : 20 °C - 42 °C

Specificațiile se pot modifica fără un anunț prealabil

Precauții

- △ Nu scăpați și nu expuneți termometrul la șocuri.
- △ Nu îndoiți și nu mușcați termometrul sau sonda acestuia.
- △ Țineți-l în locuri sigure, departe de accesul copiilor. Termometrele cu sticla spartă sau ciobită nu trebuie folosite, existând pericolul de a vă răni.

Metode de măsurare a temperaturii orale

Doctorii preferă să testeze temperatura orală deoarece această metodă are un rezultat mai precis. Bulbul termometrului (sonda) trebuie pusă sub limbă în stânga sau în dreapta în buzunarele de sub limbă. Temperatura de 37 de grade Celsius, măsurată pe o perioadă de 5 minute este considerată ca fiind normală.

Metode de măsurare a temperaturii rectal

Măsurarea temperaturii rectal este preferată ca metodă de măsurare a temperaturii copiilor. Pentru a face asta trebuie să introduceți bulbul (sonda de măsurare) în anus (aproximativ 2 cm). În vederea ușurării procesului puneți pe vârful de măsurare unguent sau ulei de corp pentru copii. **OPRIȚI-VĂ** dacă întâmpinați orice rezistență. Temperatura considerată normală la nivelul rectului este de obicei 37.6 °C. Dacă vă este recomandat de către medic să vă măsurați temperatura rectal puteți folosi o acoperitoare de sonda. Introduceți vârful termometrului în protecția pentru sondă, lubrifiați acoperitoarea de sondă cu un gel bazat pe apă pentru o inserție mai ușoară. Nu folosiți lubrifiant pe bază de petrol. Introduceți vârful termometrului fără a depăși 1.5 cm în adâncime. Timpul de măsurare este de 5 minute.

Metode de măsurare a temperaturii axilar

Folosiți un prosop moale pentru a usca axila. Plasați vârful termometrului în interiorul axilei și puneți pacientul să își țină mâna strans lipită de corp. Temperatura normală la acest tip de măsurătoare este considerată a fi de 36.7 °C (timp de măsurare 5 minute).

NOTĂ : Pentru evitarea unor măsurători inexacte asigurați-vă că termometrul este ținut timp de 5 minute.

NOTĂ : Copii trebuie să fie supravegheați în permanență de un adult pe parcursul măsurării temperaturii.

NOTĂ : Toate termometrele au fost verificate și calibrate de către producător pentru a fi în raza de toleranță a erorilor (+0.1 / -0.15°C).

Dacă veți compara temperatura măsurată cu doua termometre diferite este posibil să difere valorile măsurate chiar dacă cele două termometre funcționează normal și respectă marja de eroare. Asta nu înseamnă că vreunul din cele două termometre măsoară mai bine ele nefiind un etalon. Valorile măsurate vor fi diferite la fiecare măsurare pe care o veți face.

Mod de folosire

1. Înainte de a vă măsura temperatura asigurați-vă că lichidul din scara de măsurare este sub prima linie de măsurare numerotată (între 35 °C și 36 °C).
2. Dezinfectați termometrul înainte și după utilizare. Fiți atenți la capitolul "Instrucțiuni de curățare" de mai jos.
3. Puneți termometrul în zona de măsurare dorită (axilă, rect sau bucal).
4. Termometrul are nevoie de 5 minute pentru a măsura temperatura corpului. Pentru a citi valoarea măsurată rotiți termometrul încet în fata și în spate. Lichidul de măsurare aflat în capilarul sticlei termometrului va indica temperatura măsurată.
5. **După măsurarea temperaturii termometrul trebuie resetat. Pentru a face asta trebuie să prindeți termometrul de partea de sus și să îl scuturați mișcându-l încheietură mâinii de 15 până la 20 de ori pentru a introduce lichidul înapoi în bulb.**

NOTĂ : Dezinfectați termometrul înainte de utilizare, pentru utilizarea în mediul spitalicesc termometrul va trebui dezinfectat de către personalul autorizat.

NOTĂ : Dacă temperatura de depozitare este mai mică de 20°C, vă rugăm să țineți termometrul înainte de folosire într-o încăpere cu temperatură cuprinsă între 20 °C și 30°C timp de o oră sau două sau dacă aveți o încăpere cu temperatură de 35°C trebuie să țineți termometrul timp de zece minute în aceasta.

Instrucțiuni de curățare

Termometrul este făcut din sticlă ermetică care poate fi dezinfectată. Temperatura soluției în care sau cu care se face dezinfectarea nu trebuie să fie de 42 °C. Înainte de a vă măsura temperatura, vă recomandăm să aveți grijă pentru a evita eventualele riscuri de rănire.

Înainte și după fiecare folosire, curățați sticla termometrului prin spălare cu apă și săpun. Dezinfectați termometrul cu ajutorul unui tampon de vată sau al unei cârpe moi care în prealabil au fost înmuiate în alcool sanitar sau scufundați termometrul într-o soluție dezinfectantă.

Dacă termometrul se sparge puteți înlătura lichidul curs cu o cârpă, perie, șervețel de hârtie.

Certificat de garanție comercială

SMART TOUCH GROUP SRL, cu sediul în București, Strada Iacob Negruzzi 39, cod unic de înregistrare RO26740339, J40/3542/2010, capital social 200 lei, în calitate de Vânzător (denumit în continuare „Smart Touch Group”), acordă Cumpărătorului, strict în condițiile prevăzute mai jos, o garanție de funcționare corespunzătoare a produsului achiziționat de Cumpărător, (denumit în continuare în mod generic „Produsul”), în condițiile unei utilizări normale a Produsului, potrivit scopului și destinației acestuia.

PRODUS : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.

DATA VÂNZĂRII : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.

TERMEN GARANȚIE* : conform bonului fiscal atașat / facturii atașate : 12 luni

* se calculează de la data vânzării, indicată în bonul fiscal atașat / facturii atașate

Bonul fiscal / factura face parte integrantă din prezentul Certificat de Garanție comercială. Cumpărătorul, în calitate de consumator, beneficiază de toate drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, inclusiv prin Ordonanța de Guvern nr. 21/1992 republicată, Legea nr. 449/2003, republicată și actualizată cu actele normative subsecvente, și Legea nr. 296/2004, republicată, cu modificările ulterioare în vigoare la data cumpărării.

Prezenta garanție nu afectează în niciun fel drepturile conferite consumatorului prin lege și nu exclude răspunderea Vânzătorului pentru lipsa de conformitate a Produsului, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 449/2003, precum și răspunderea pentru vicii ascunse ale Produsului și Cumpărătorul declară și confirmă că s-au predat, după caz, instrucțiunile de utilizare și întreținere în limba română, și s-a predat Produsul în perfectă stare de funcționare, s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanție.

Condiții de acordare a garanției

1. Pentru a beneficia de prezenta garanție, Cumpărătorul este obligat să prezinte factura originală/bonul fiscal original de cumpărare a Produsului și Certificatul de Garanție al Produsului.

2. Garanția privește Produsul în integralitatea sa, așa cum a fost livrat Cumpărătorului. Si nu se extinde asupra consumabilelor.

3. Garanția este asigurată de către Smart Touch Group prin înlocuirea Produsului defect cu un altul identic, în limita stocului Smart Touch Group disponibil, sau, în cazul în care înlocuirea acestuia nu este posibilă sau este disproporționată, prin restituirea contravalorii Produsului conform legislației în vigoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data când Smart Touch Group a luat cunoștință de deficiențele respective sau de la data la care un document de predare-primire a fost încheiat ca urmare a predării Produsului de către Cumpărător unei persoane desemnate Smart Touch Group pentru a încheia documentul de predare-primire, dată aflată în interiorul termenului de garanție, cu condiția respectării tuturor cerințelor din prezentul certificat.

4. Pentru repararea Produsului, Cumpărătorul va contacta Vânzătorul telefonic la numărul de telefon 0724313365 sau în scris pe e-mail office@smarttouchgroup.ro.

5. În cazul în care Produsul este un produs de folosință îndelungată, potrivit art. 2 lit. i) din Legea 449/2003, care nu poate fi reparat sau a cărui durată cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, Cumpărătorul poate cere înlocuirea Produsului sau restituirea contravalorii Produsului.

6. Eventualele deteriorări cauzate de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare de genul zgârieturilor, șocurilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group în momentul achiziționării Produsului nu constituie obiectul garanției.

7. Termenul de garanție este 12 luni. Termenul de garanție curge de la data intrării Produsului în posesia Cumpărătorului.

8. Pentru produsele reparate, termenul de garanție comercială se prelungește cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă între momentul în care deficiențele Produsului, survenite în interiorul termenului

de garanție, au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group / Produsul a fost prezentat persoanei desemnate de Smart Touch Group cu încheierea documentelor de predare-primire și momentul în care Produsul a fost înlocuit și , respectiv, Cumpărătorul a fost notificat în scris în vederea ridicării sau predării efective a Produsului.

Pierderea garanției

Smart Touch Group fiind exonerat de obligațiile sale privind garanția, la îndeplinirea oricărei condiții de mai jos:

1. Nerespectarea de către Cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere ori a parametrilor de alimentare (ex: temperatură mediu ambiant, etc.) precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc Produsul la livrare și de care Cumpărătorul a luat la cunoștință.
2. Defectul reclamat se datorează vinei exclusive a Cumpărătorului.
3. Modificarea / desigilarea / repararea Produsului de către persoane fizice sau juridice neautorizate de către Smart Touch Group.
4. Utilizarea Produsului în alt regim decât cel precizat de manualul utilizatorului.

Importator : Smart Touch Group S.R.L. , str. Iacob Negruzzi , nr. 39.

Pentru garanție puteți sa ne contactați la numărul de telefon : 0724313365.

Adresa de primire a produselor pentru garanție este : Strada Oașului 16, Otopeni, Județ Ilfov.

Vânzător

Cumpărător



Nu aruncați produsul la gunoi!