

Termometru digital vârf flexibil Model MC201

Atenționări

- △ Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
- △ Pericol de sufocare ! Vârful termometrului sau capacul pot fi fatale dacă sunt înghițite. Nu lăsați copii să utilizeze termometrul fără a fi supravegheați.
- △ Nu folosiți termometrul pentru a vă măsura temperatura din ureche. Termometrul este conceput pentru măsurarea temperaturii rectale, bucale sau axilare.
- △ Nu puneți bateria termometrului în zone cu căldură extremă, aceasta poate exploda.
- △ NOTĂ : Folosirea materialului care acoperă sonda de măsurare poate crea o discrepanță de 0.1 grade Celsius față de temperatura reală.
- △ Se recomandă verificarea aparatului la fiecare 2 ani.
- △ Nu încercați să desfaceți sau să reparați termometrul, aceasta duce la pierderea garanției și la valori eronate de măsurare.
- △ După fiecare folosire dezinfectați termometrul dacă acesta este folosit de mai multe persoane.
- △ Îndepărtați bateria aparatului dacă nu îl veți utiliza pentru o perioadă mare de timp.
- △ Folosirea măsurătorilor temperaturii pentru a vă diagnostica este periculoasă. Consultați-vă medicul pentru a vă da un diagnostic corect. Autodiagnosticarea poate duce la înrăutățirea stării de sănătate.
- △ Nu măsurați temperatura în cazul în care termometrul este ud, acest lucru poate duce la rezultate eronate.
- △ Nu mușcați termometrul , aceasta poate duce la distrugerea lui sau la rănirea dumneavoastră.
- △ Nu forțați introducerea termometrului în rect dacă acest lucru produce durere. Nerespectarea acestei atenționări poate duce la răniri.
- △ Nu folosiți termometrul la măsurarea temperaturii orale dacă acesta a fost folosit pentru măsurarea temperaturii rectale.
- △ Nu folosiți termometrul pentru măsurarea temperaturii copiilor aflați la vârstă de 2 ani sau mai mici de aceasta vârstă.

Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Acest termometru asigură o măsurare rapidă și precisă a temperaturii corpului uman. Pentru o bună înțelegere a modului de funcționare, a funcțiilor și a unei siguranțe că aparatul face măsurători corecte, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire înainte de a-l utiliza.


Acest aparat este un dispozitiv medical și este fabricat în conformitate cu standardul de calitate EN12470-3/2000 + A1/2009 și EN ISO13485/2016/AC/2016.

Conținutul cutiei

- 1 termometru;
- 1 manual de folosire;
- 1 cutie pentru depozitare;

PRODUCT ILLUSTRATION

Figure 1

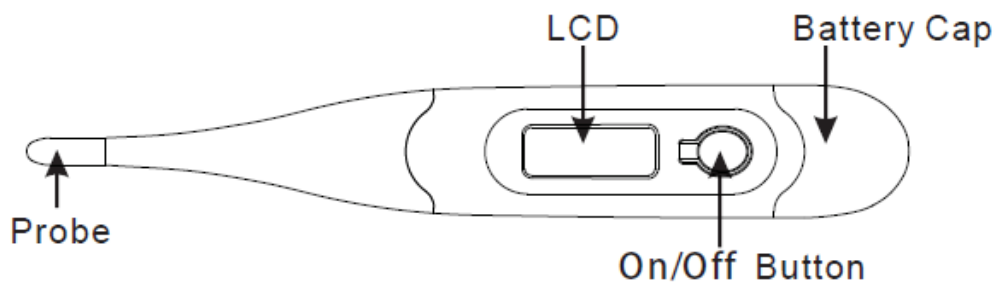

Precauții

Performanțele termometrului pot fi denaturate dacă unul sau mai multe evenimente amintite mai jos se întâmplă:

- Δ operarea aparatului se face în afara limitelor stabilite de producător referitoare la temperatură și umiditate.
- Δ stocarea aparatului se face în afara limitelor stabilite de producător referitoare la temperatură și umiditate.
- Δ șocuri mecanice.
- Δ temperatura pacientului este sub temperatura ambientului în care se face măsurarea.
- Δ dispozitive portabile cu radio frecvență cum ar fi telefoanele mobile sau cuptoarele cu microunde, care generează câmpuri electrice sau electromagnetice foarte puternice, folosite în apropierea termometrului pot interfera cu acesta.

Explicația simbolurilor

-  Curent continuu
-  Tip BF , clasificare de dispozitiv medical
-  Identificare produs
-  Identitate fabricant
-  Atenție . Consultați documentele care însoțesc produsul.

Specificații

Tip	Termometru digital (nu predictiv)
Intervale	32,0°C – 42,9°C
Acuratețe	± 0.1°C, 35.5°C – 42.0°C
	± 0.2°C sub 35.5 °C sau peste 42.0 °C
	la o temperatură ambiantă de 18 °C până la 28 °C
Afișaj	Afișaj cu cristale lichide, 3 1/2 cifre
Memorie	Pentru stocarea ultimei valori măsurate
Baterie	O baterie de 1.5 V CC (dimensiune LR41 sau SR41, UCC 392)
Durata de viață a bateriei	Aproximativ 200 de ore
Dimensiuni	12.4 cm x 1.8 cm x 0.9 cm (L x W x H)
Greutate	Aproximativ 10 grame inclusiv bateria
Mediu de utilizare	Temperatură : 5°C – 40°C

	Umiditate relativă : 15% – 95% RH
Condiții de depozitare și transport	Temperatură : -20°C – 55°C
	Umiditate relativă : 15% – 95% RH
Grad protecție la intrare	IP22
Clasificare	Tip BF

Instrucțiuni


1. Apăsați butonul On/Off aflat în apropierea ecranului. Veți auzi un sunet și pe ecran vă va apărea, urmat de temperatura măsurată ultima dată. După apariția acestora termometrul , poate fi folosit pentru măsurarea temperaturii.

NOTĂ : Dacă temperatura măsurată este sub 32 de grade Celsius pe ecran vă apărea Lo , iar în cazul în care temperatura măsurată este mai mare de 42.9 grade Celsius vă apărea Hi.

2. Poziționați termometrul în cavitatea dorită (bucală, rectală sau axilară).

Măsurarea orală

Puneți termometrul sub limbă în poziția indicată de din figura 2. Închideți gura și respirați pe nas normal pentru a împiedica inspirarea sau expirarea aerului să influențeze măsurarea temperaturii. Temperatura normală se încadrează între 35.7 și 37.3 grade Celsius.

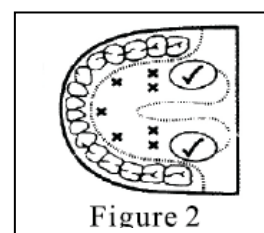

Măsurarea rectală

Lubrifiați capătul argintiu al sondei pentru o inserție mai ușoară. Introduceți cu grijă termometrul aproximativ 1 cm (mai puțin de jumătate a părții argintii). Temperatura normală se încadrează între 36.2 și 37.7 grade Celsius.

Măsurarea axilară

Ștergeți axila. Puneți sonda de măsurare sub braț și apropiați-vă bine mâna de corp. Din punct de vedere medical această măsurătoare nu poate fi corectă deoarece apar tot timpul discrepanțe și valorile măsurate nu pot fi luate în considerare.

3. Simbolul gradelor clipește în timpul efectuării măsurătorii. În momentul în care nu mai clipește se va auzi un sunet timp de 10 secunde. În același timp valoarea temperaturii va fi afișată pe ecran. Timpul minim de măsurare trebuie respectat , acesta durează până la auzirea sunetului. Măsurarea continuă și după sunetul alarmei. Temperatura care apare pe ecran la terminarea măsurării nu se va schimba în momentul îndepărtării termometrului din locul din care veți lua temperatura.

NOTĂ : În mod normal sunetul pe care alarma termometrului îl va face este “Bi-Bi-Bi-“, dar dacă temperatura măsurată depășește 37.8 grade Celsius sau peste aceasta valoare sunetul va fi “Bi-Bi-Bi” fără a mai exista o pauză între aceste sunete.

4. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei opriți termometrul după efectuarea măsurătorii. Dacă nu veți opri termometrul acesta se va opri în mod automat după 10 minute.
5. Păstrați termometrul în cutia acestuia.

Înlocuirea bateriei

1. Înlocuirea bateriei se face atunci când pe ecran apare semnul .
2. Scoateți capacul bateriei așa cum este indicat în figura 3.

3. Trageți ușor de circuitul pe care se află bateria, nu trageți circuitul mai mult de 1 centimetru în afară, așa cum arată figura 4.

4. Folosiți un obiect ascuțit, cum ar fi un pix pentru a putea scoate bateria. Aruncați bateria doar la centrele de reciclare. Înlocuiți bateria cu o baterie tip pastilă de 1.5V tip LR41, SR41, UCC392 sau echivalentă. Asigurați-vă că puneți bateria cu sarcina "+" în sus. Vezi figura 5.

5. Introduceți circuitul înapoi și puneți capacul.

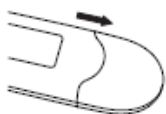


Figure 3



Figure 4

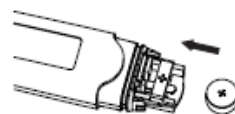


Figure 5

Curățarea și dezinfectarea

Ștergeți termometrul cu o cârpă curată și moale.

Pentru pete folosiți o cârpă umezită cu apă sau cu un detergent neutru. Ștergeți pata și apoi folosiți o cârpă moale pentru a-l usca.

Atenție la cele de mai jos pentru a nu deteriora termometrul :

- Nu folosiți benzină, diluant sau altfel de substanțe chimice puternice pentru a curăța termometrul.
- Nu lăsați termometrul cu vârful în alcool pentru perioade mari de timp pentru a-l steriliza și nici nu îl sterilizați în apă cu temperatură mai mare de 50 grade Celsius.
- Nu folosiți aparate de curățare ultrasonice pentru a steriliza termometrul.

Certificat de garanție comercială

SMART TOUCH GROUP SRL, cu sediul în București, Strada Iacob Negruzzi 39, cod unic de înregistrare RO26740339, J40/3542/2010, capital social 200 lei, în calitate de Vânzător (denumit în continuare „Smart Touch Group”), acordă Cumpărătorului, strict în condițiile prevăzute mai jos, o garanție de funcționare corespunzătoare a produsului achiziționat de Cumpărător, (denumit în continuare în mod generic „Produsul”), în condițiile unei utilizări normale a Produsului, potrivit scopului și destinației acestuia.

PRODUS : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.

DATA VÂNZĂRII : _____ conform bonului fiscal atașat / facturii atașate.

TERMEN GARANȚIE* : conform bonului fiscal atașat / facturii atașate : 12 luni

* se calculează de la data vânzării, indicată în bonul fiscal atașat / facturii atașate

Bonul fiscal / factura face parte integrantă din prezentul Certificat de Garanție comercială. Cumpărătorul, în calitate de consumator, beneficiază de toate drepturile acordate de legislația privind protecția consumatorilor, inclusiv prin Ordonanța de Guvern nr. 21/1992 republicată, Legea nr. 449/2003, republicată și actualizată cu actele normative subsecvente, și Legea nr. 296/2004, republicată, cu modificările ulterioare în vigoare la data cumpărării.

Prezenta garanție nu afectează în niciun fel drepturile conferite consumatorului prin lege și nu exclude răspunderea Vânzătorului pentru lipsa de conformitate a Produsului, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 449/2003, precum și răspunderea pentru vicii ascunse ale Produsului și Cumpărătorul declară și confirmă că s-au predat, după caz, instrucțiunile de utilizare și întreținere în limba română, și s-a predat Produsul în perfectă stare de funcționare, s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanție.

Condiții de acordare a garanției

1. Pentru a beneficia de prezenta garanție, Cumpărătorul este obligat să prezinte factura originală/bonul fiscal original de cumpărare a Produsului și Certificatul de Garanție al Produsului.
2. Garanția privește Produsul în integralitatea sa, așa cum a fost livrat Cumpărătorului. Si nu se extinde asupra consumabilelor.
3. Garanția este asigurată de către Smart Touch Group prin înlocuirea Produsului defect cu un altul identic, în limita stocului Smart Touch Group disponibil, sau, în cazul în care înlocuirea acestuia nu este posibilă sau este disproporționată, prin restituirea contravalorii Produsului conform legislației în vigoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data când Smart Touch Group a luat cunoștință de deficiențele respective sau de la data la care un document de predare-primire a fost încheiat ca urmare a predării Produsului de către Cumpărător unei persoane desemnate Smart Touch Group pentru a încheia documentul de predare-primire, dată aflată în interiorul termenului de garanție, cu condiția respectării tuturor cerințelor din prezentul certificat.
4. Pentru repararea Produsului, Cumpărătorul va contacta Vanzătorul telefonic la numărul de telefon 0724313365 sau în scris pe e-mail office@smarttouchgroup.ro.
5. În cazul în care Produsul este un produs de folosință îndelungată, potrivit art. 2 lit. i) din Legea 449/2003, care nu poate fi reparat sau a cărei durată cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, Cumpărătorul poate cere înlocuirea Produsului sau restituirea contravalorii Produsului.
6. Eventualele deteriorări cauzate de manipularea sau utilizarea necorespunzătoare de genul zgârieturilor, șocurilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group în momentul achiziționării Produsului nu constituie obiectul garanției.
7. Termenul de garanție este 12 luni. Termenul de garanție curge de la data intrării Produsului în posesia Cumpărătorului.
8. Pentru produsele reparate, termenul de garanție comercială se prelungește cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă între momentul în care deficiențele Produsului, survenite în interiorul termenului de garanție, au fost aduse la cunoștința Smart Touch Group / Produsul a fost prezentat persoanei desemnate de Smart Touch Group cu încheierea documentelor de predare-primire și momentul în care Produsul a fost înlocuit și, respectiv, Cumpărătorul a fost notificat în scris în vederea ridicării sau predării efective a Produsului.

Pierdere a garanției

Smart Touch Group fiind exonerat de obligațiile sale privind garanția, la îndeplinirea oricărei condiții de mai jos:

1. Nerespectarea de către Cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere ori a parametrilor de alimentare (ex: temperatură mediu ambiant, etc.) precizate în prospectele și instrucțiunile ce însoțesc Produsul la livrare și de care Cumpărătorul a luat la cunoștință.
2. Defectul reclamat se datorează vinei exclusive a Cumpărătorului.
3. Modificarea / desigilarea / repararea Produsului de către persoane fizice sau juridice neautorizate de către Smart Touch Group.
4. Utilizarea Produsului în alt regim decât cel precizat de manualul utilizatorului.

Importator : Smart Touch Group S.R.L. , str. Iacob Negruzzi , nr. 39.

Pentru garanție puteți sa ne contactați la numărul de telefon : 0724313365.

Adresa de primire a produselor pentru garanție este : Strada Oașului 16, Otopeni, Județ Ilfov.

Vanzător

Cumpărător



Nu aruncați produsul la gunoi!



Wuxi Exanovo Medical Instrument Co. Ltd.

No. 42 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town Wuxi City 214194 Jiangsu China

EC

REP

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.